

veterinary technology for life

Eickemeyer®

www.eickemeyer.it

Telefono 085 935 4078

HEINE BETA X VET

Set diagnostico



HEINE BETA X VET SET DIAGNOSTICO

Maggiore attenzione al paziente. Meno stress nel flusso di lavoro

Il nuovo set diagnostico HEINE BETA X VET è stato sviluppato appositamente per le esigenze della pratica veterinaria, garantendo flussi di lavoro efficienti, pazienti tranquilli e diagnosi affidabili nel minor tempo possibile.

Vantaggi principali

- ▶ Esami senza interruzioni: Il primo otoscopio al mondo con luce di esame aggiuntiva inSPECT integrata consente un flusso di lavoro fluido, fa risparmiare tempo prezioso e riduce lo stress per l'animale
- ▶ Controllo intuitivo della luce: La luminosità può essere regolata istantaneamente, consentendo esami delicati senza reazioni difensive
- ▶ Sempre pronto all'uso: La doppia base di ricarica inclusa mantiene entrambi gli strumenti completamente carichi e pronti all'uso in ogni momento

Caratteristiche principali del dispositivo

Otoscopio HEINE BETA X VET

- ▶ Esclusiva mondiale: luce d'esame aggiuntiva integrata e moduli ottici intercambiabili
- ▶ Sistema X CHANGE: adattatore opzionale per smartphone per una documentazione rapida e una comunicazione trasparente dei risultati
- ▶ Ottica orientabile per un comodo utilizzo nell'orecchio, nella bocca e nella gola

Oftalmoscopio HEINE BETA X VET

- ▶ Ottica AOS⁺ per esami del fondo oculare senza riflessi
- ▶ Ottica di precisione e focusCONTROL per una visione chiara dei segmenti anteriori e posteriori dell'occhio
- ▶ Sette aperture, filtri red-free e di polarizzazione per ogni situazione di esame

Caratteristiche aggiuntive

- ▶ Riproduzione naturale dei colori per una precisione diagnostica ottimale
- ▶ Illuminazione uniforme e brillante grazie alla fibra ottica
- ▶ HEINE LED^{HO} e tecnologia a fibra ottica per un'illuminazione ottimale
- ▶ Finestrella d'osservazione di grande diametro
- ▶ Ottimizzato per il ricondizionamento igienico
- ▶ Selezione di due intensità luminose
- ▶ Design ergonomico, leggero e durevole
- ▶ Sempre pronto all'uso grazie alla doppia base di ricarica inclusa
- ▶ 5 anni di garanzia



302580

HEINE BETA X VET STAZIONI DI RICARICA

HEINE BETA X VET Stazione di ricarica singola

La stazione di ricarica singola HEINE BETA X VET è una soluzione da tavolo compatta per un singolo strumento della serie HEINE X VET. Consente un processo di ricarica automatico e delicato – indipendentemente dallo stato attuale della batteria – garantendo così la massima durata dell'accumulatore. Il dispositivo non può essere sovraccaricato: una volta che la batteria è completamente carica, il processo di ricarica si interrompe automaticamente. Il livello di carica è sempre leggibile direttamente sullo strumento. La stazione può essere alimentata in modo flessibile tramite USB-C.

- ▶ Dimensioni: 80 × 105 × 87 mm
- ▶ Peso: 550 g (netto)
- ▶ Fornita senza alimentatore e cavo



302583

HEINE BETA X VET Stazione di ricarica doppia

La stazione di ricarica doppia HEINE BETA X VET è una soluzione da tavolo compatta per la ricarica simultanea di due strumenti della serie HEINE BETA X VET – ideale per l'uso combinato di otoscopio e oftalmoscopio. Garantisce un processo di ricarica automatico e rispettoso della batteria, indipendentemente dallo stato di carica. Il sovraccarico è escluso: non appena le batterie sono completamente cariche, il processo si interrompe automaticamente. Lo stato di carica attuale può essere verificato in qualsiasi momento direttamente sullo strumento. Per la massima flessibilità, la stazione può essere alimentata facilmente tramite USB-C.

- ▶ Dimensioni: 160 × 105 × 87 mm
- ▶ Peso: 560 g (netto)
- ▶ Fornita senza alimentatore e cavo



302584

Per oftalmoscopio e otoscopio è incluso un alimentatore di rete con relativo cavo.

HEINE ALLSPEC PUNTALI MONOUSO

HEINE AllSpec Puntali monouso

Puntali monouso HEINE AllSpec – EcoTips realizzati in plastica riciclata per tutti gli attuali otoscopi HEINE. Utilizzabili con l'adattatore HEINE Tip Adapter, che funge da interfaccia tra gli otoscopi diagnostici BETA 100, K100, BETA 100 VET, gli otoscopi operativi e i puntali monouso AllSpec.

HEINE AllSpec Puntali monouso, Ø 2,5 mm

- ▶ Confezione sfusa da 250 pezzi

HEINE AllSpec Puntali monouso, Ø 4,0 mm

- ▶ Confezione sfusa da 250 pezzi



302588

302587



302587

HEINE BETA X VET OFTALMOSCOPIO

Das **HEINE BETA X VET** è il primo oftalmoscopio diretto di HEINE sviluppato specificamente per la medicina veterinaria. Grazie al sofisticato sistema ottico AOS⁺ e alla tecnologia LED^{HQ}, offre una visione nitida e dettagliata del fondo oculare. Con l'esclusivo sistema focusCONTROL, i veterinari possono passare facilmente da una messa a fuoco all'altra, consentendo anche l'esame del segmento anteriore dell'occhio. La regolazione individuale della luminosità evita un'illuminazione eccessiva e permette esami a basso stress in diverse condizioni di luce. Ulteriori pratiche funzionalità includono diversi filtri e diaframmi, utilizzabili a seconda delle esigenze. Le ampie funzionalità e la facilità d'uso rendono l'oftalmoscopio BETA X VET uno strumento versatile, adatto a un'ampia gamma di applicazioni, dall'uso generale fino agli specialisti.

Principali vantaggi

- ▶ Visione nitida e dettagliata del fondo oculare grazie al sistema ottico AOS⁺ e LED^{HQ}
- ▶ Regolazione intelligente della luminosità con controllo a microprocessore
- ▶ Durevole, leggero ed ergonomico
- ▶ Esclusivo HEINE focusCONTROL – passaggio tra segmento anteriore e fondo oculare
- ▶ Filtro di polarizzazione integrato

Ulteriori caratteristiche

- ▶ Sistema modulare HEINE X CHANGE per funzioni espandibili
- ▶ Alimentazione intelligente con indicatore di carica e spegnimento automatico
- ▶ Custodia robusta e opzione di ricarica USB-C per l'uso quotidiano in clinica
- ▶ 5 anni di garanzia



302582

Illustrazione in dimensioni originali

HEINE BETA X VET OPHTHALMOSKOP PANORAMICA DELLE FUNZIONI

1 Ottimizzata per il ricondizionamento igienico

- ▶ Finestra di ispezione resistente ai graffi in vetro temperato
- ▶ smoothSURFACE e porta USB-C incassata

2 Ottima compensazione della rifrazione

Messa a fuoco precisa selezionabile in 74 singoli gradi diottrici da -36D a +38D

3 Regolatore di luminosità intelligente con controllo a microprocessore

- ▶ Facile da usare con il pollice
- ▶ Rotazione rapida del regolatore per modificare in modo significativo l'intensità dell'illuminazione
- ▶ Rotazione lenta del regolatore per una regolazione precisa dell'intensità luminosa
- ▶ Regolazione continua dell'intensità luminosa tra 1 e 100 %
- ▶ Premere il regolatore per accendere/spegnere
- ▶ All'accensione, si avvia sempre con l'ultima intensità luminosa utilizzata

4 Resistente, leggero ed ergonomico

- ▶ Robusto telaio integrato in alluminio
- ▶ Alloggiamento realizzato con una speciale miscela di materiali altamente resistenti agli urti, termoformato e ottimizzato per il ricondizionamento igienico
- ▶ Perfettamente bilanciato per un'ergonomia eccellente e una manipolazione sicura

5 Alimentazione intelligente

- ▶ Indicatore dello stato di carica
- ▶ Funzione di spegnimento automatico
- ▶ Ricaricabile con USB-C o stazione di ricarica

6 Visione nitida e chiara del fondo oculare con il nuovo sistema ottico AOS⁺ e LED^{HQ}

- ▶ Il sistema ottico asferico AOS⁺ riduce i riflessi corneali in modo ancora più efficace grazie alla separazione ottimizzata del fascio di illuminazione e di osservazione
- ▶ Illuminazione LED^{HQ} per un'illuminazione uniforme e brillante con resa cromatica naturale per un contrasto elevato e una rappresentazione estremamente dettagliata
- ▶ Design a tenuta di polvere del sistema ottico

7 Il nuovo filtro polarizzatore orientabile

Con polarizzazione: riduce i riflessi corneali e la luce diffusa
Senza polarizzazione: riflesso maculare (riflesso maculare) e riflesso arterioso (arterie argentate e ramate) chiaramente riconoscibili

8 7 diversi diaframmi

Tutti i diaframmi possono essere utilizzati anche con filtro polarizzatore e filtro rosso



9 Il nuovo HEINE focusCONTROL

Passaggio semplice dalla messa a fuoco della parte anteriore dell'occhio al fondo oculare



HEINE BETA X VET OTOSCOPIO

L'otoscopio HEINE BETA X VET è dotato di una luce di esame inSPECT integrata, che consente di effettuare esami di occhi, naso e cavità orale senza cambiare strumento – per flussi di lavoro più rapidi e meno stress per l'animale e l'operatore.

La luminosità regolabile garantisce un esame tranquillo, mentre l'ottica di alta qualità consente risultati diagnostici chiari.

Il sistema è completato da un controllo intelligente della luce e da una stazione di ricarica doppia affidabile.

Principali vantaggi

- ▶ Luce di esame inSPECT integrata (innovazione mondiale)
- ▶ Controllo della luminosità intuitivo e regolabile
- ▶ Ottica orientabile per esami di orecchio, cavità orale e faringe
- ▶ Sistema X CHANGE con adattatore opzionale per smartphone

Ulteriori caratteristiche

- ▶ Riproduzione cromatica naturale
- ▶ Illuminazione uniforme a fibra ottica
- ▶ Tecnologia LED^{HQ} di lunga durata
- ▶ Igienicamente rielaborabile, ergonomico e leggero
- ▶ 5 anni di garanzia

Contenuto della confezione

- ▶ HEINE® BETA X VET Otoscopio
- ▶ HEINE X CHANGE Sistema SL-Magnifier
- ▶ HEINE XV4 e XV6 Speculum
- ▶ HEINE AllSpec Puntali monouso 4 mm – 10 pz
- ▶ HEINE E4-USB-C-Alimentatore
- ▶ Custodia di trasporto



302585

302586



302581

Illustrazione in dimensioni originali



HEINE BETA X VET OTOSCOPIO PANORAMICA DELLE FUNZIONI

1 Il nuovo sistema HEINE X CHANGE

Ampliate le funzioni del vostro otoscopio con i moduli HEINE X CHANGE facilmente sostituibili:

► HEINE X CHANGE SL-Magnifier

- Ingrandimento 1,6x
- Ottica di precisione orientabile con rivestimento multistrato per immagini nitidissime
- Comodo utilizzo degli strumenti: perfetto per interventi controllati nel condotto uditivo, nel naso, nella cavità orale e nella gola

► HEINE X CHANGE Sistema Adattatore per smartphone

- Facile acquisizione di immagini digitali con qualsiasi smartphone

2 Comando intuitivo dell'illuminazione

- Facile passaggio dall'otoscopio all'esclusiva illuminazione HEINE inSPECT
- Pratico comando con un solo dito

3 Alimentazione intelligente

- Indicatore dello stato di carica
- Funzione di spegnimento automatico
- Ricaricabile con USB-C o stazione di ricarica

4 La nuova lampada da visita aggiuntiva HEINE inSPECT per occhi, gola e altro

- Unica al mondo e in attesa di brevetto: testata dal punto di vista medico e sicura per l'esame dei media oculari anteriori e del riflesso pupillare
- Ideale per l'illuminazione di strutture anatomiche profonde nella bocca e nella gola

5 Tecnologia HEINE LED^{HO} e fibra ottica per un'illuminazione ottimale

- Illuminazione uniforme e molto luminosa con resa cromatica naturale per un contrasto elevato e una rappresentazione ricca di dettagli
- La fibra ottica offre una visione senza ostacoli del condotto uditivo e del timpano

6 Diametro interno dell'imbuto 6 mm per una facile strumentazione

7 Speculum metallici in acciaio inossidabile chirurgico con diametro di 4 e 6 mm

- Di alta qualità e facili da pulire.
- Fissaggio saldo sulla testina
- Punta dello speculum arrotondata per un inserimento delicato nel condotto uditivo (Qualità controllata. Senza spigoli vivi)

8 Resistente, leggero ed ergonomico

- Alloggiamento realizzato con una speciale miscela di materiali altamente resistente agli urti, termoformato e ottimizzato per il ricondizionamento igienico
- Bilanciato con precisione per un'ergonomia eccellente e una manipolazione sicura

9 Ricondizionamento sicuro e igienico grazie alla

- Superficie liscia smoothSURFACE e ai connettori incassati



Eickemeyer®

EICKEMEYER®
Via G. Verdi 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia
T 085 935 4078
info@eickemeyer.it
www.eickemeyer.it

QUALITY |
MADE IN GERMANY



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Dornierstraße 6
82205 Gilching
Germania
www.heine.com