

OP-TISCH MIT V-TISCHPLATTE

MONTAGEANLEITUNG

OPERATING TABLE
V TOP

ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Art. No. 602060
602070


TELEPHONE +49 7461 96 580 0

www.eickemeyer.com


veterinary technology for life
Eickemeyer®

MONTAGE/ASSEMBLY


1. Schrauben entfernen / Untighten screws

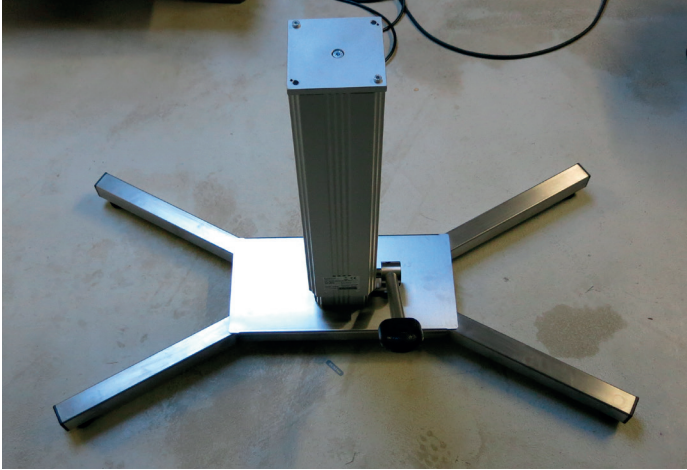


2. Sockel ohne Schrauben / Base without screws

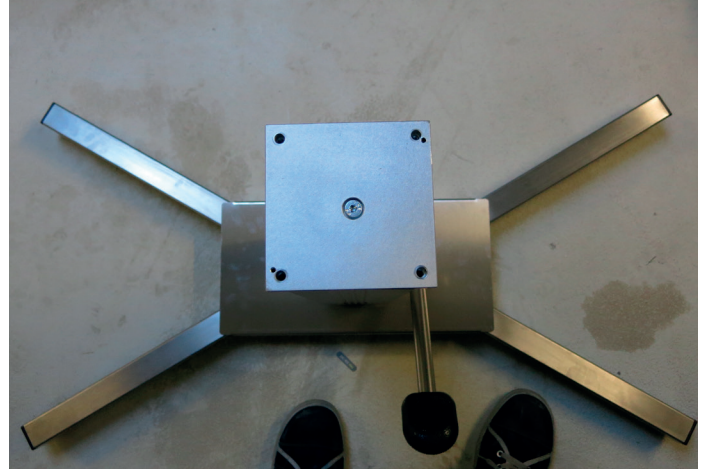

3. Grundplatte richtig platzieren / Place base plate correctly

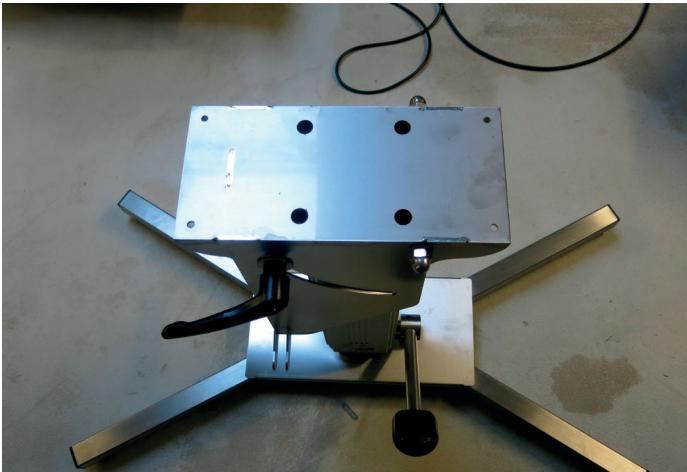


4. Grundplatte mit Schrauben fixieren / Mount baseplate with screws

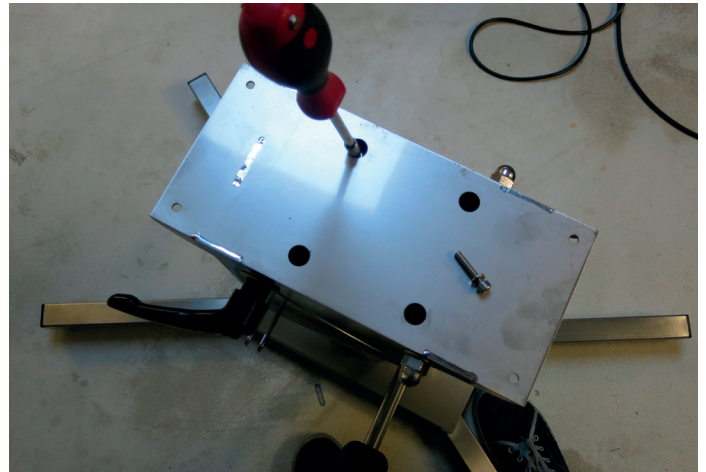


5. Tischplatte mit Flügeln auflegen (Frontansicht). Achten sie auf Positionierung der Aufnahmen für die Zylinder. Place winged table top (frontal view). Take care of right positioning of the cylinder mounting.



6. Tischplatte mit Flügeln auflegen (Frontansicht). Place winged table top (back view).

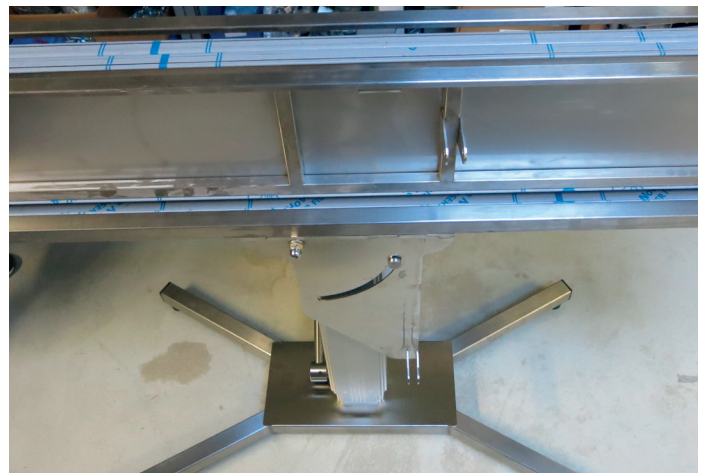


7. Nutzen Sie die beiliegenden Schrauben für die Fixierung der Tischplatte. / Use the screws shown for fixating the winged table top.

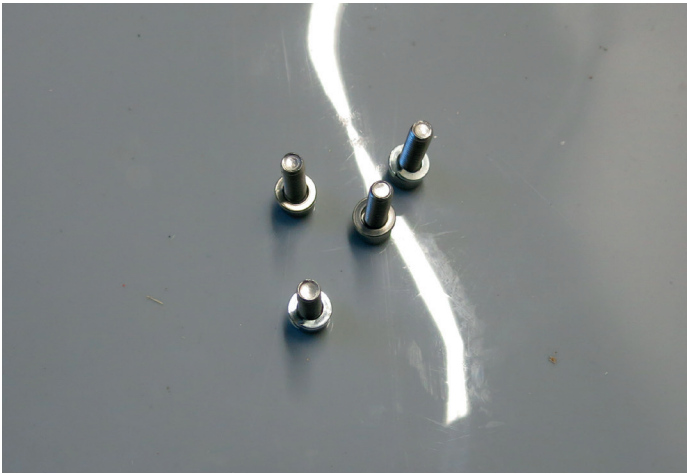

8. Befestigte Tischplatte / Mounted tabletop



9. Pneumatische Zylinder / Pneumatic cylinders

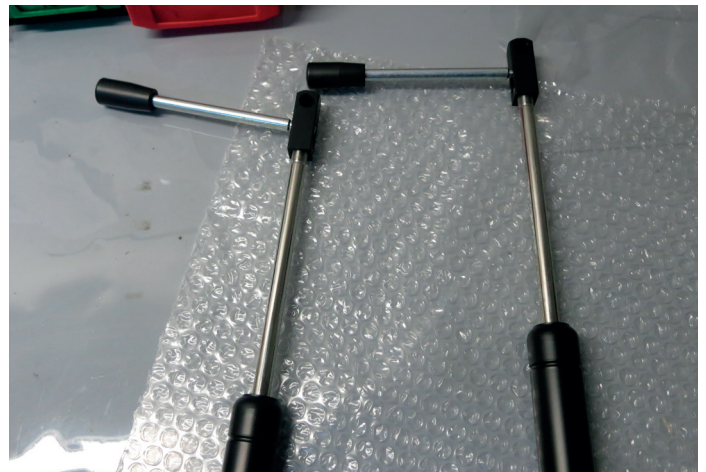

10. Befestigen Sie die Zylinderköpfe wie abgebildet.
Mount head of the cylinders as shown.



11. Befestigen Sie die Zylinderenden wie abgebildet.
Mount bottom of the cylinders as shown.



GERMANY

EICKEMEYER KG
Eltastraße 8
78532 Tuttlingen
T +49 7461 96 580 0
F +49 7461 96 580 90
E info@eickemeyer.de
www.eickemeyer.de

ITALY

EICKEMEYER S.R.L.
Via G. Verdi, 8
65015 Montesilvano (PE)
T +39 085 935 4078
F +39 085 935 9471
E info@eickemeyer.it
www.eickemeyer.it

CANADA

EICKEMEYER Inc.
250 Briarhill Dr.
Stratford, Ont. Canada
N5A 7S2
T +1 519 273 5558
F +1 519 271 7114
E info@eickemeyervet.ca
www.eickemeyervet.ca

NETHERLANDS

EICKEMEYER B.V.
Bedrijventerrein
Pavijen-West, Bellweg 44
4104 BJ Culemborg
T +31 345 58 9400
F +31 345 58 9401
E info@eickemeyer.nl
www.eickemeyer.nl

SWITZERLAND

EICKEMEYER AG
Sandgrube 29
9050 Appenzell
T +41 71 788 23 13
F +41 71 788 23 14
E info@eickemeyer.ch
www.eickemeyer.ch

DENMARK

EICKEMEYER ApS
Lysbjergvej 6, Hammelev
6500 Vojens
T +45 7020 5019
F +45 7353 5019
E info@eickemeyer.dk
www.eickemeyer.dk

POLAND

EICKEMEYER Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
T +48 22 185 55 76
F +48 22 185 59 40
E info@eickemeyer.pl
www.eickemeyer.pl

UNITED KINGDOM

EICKEMEYER Ltd.
3 Windmill Business Village
Brooklands Close
Sunbury-on-Thames
Surrey, TW16 7DY
T +44 20 8891 2007
F +44 20 8891 2686
E info@eickemeyer.co.uk
www.eickemeyer.co.uk